



ELECTROTECNIA
FIORINO

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA EMERGENCIAS Y RESCATE

Autorizado por Ministerio de Salud, A.N.M.A.T. PM-1236

FERULAS INFLABLES PROFESIONALES

NEW AIR SPLINT



"Protegido Bajo el Registro de
Modelo Industrial N° 79732"

"Protegido Bajo el Registro de
Modelo Industrial N° 79731"

Set de férulas inflables NEW AIR SPLINT, confeccionadas en PVC flexible cristal doble pared (totalmente transparente, facilitando la evaluación permanente del paciente durante y posteriormente a la inmovilización) traslúcidas a RX, CT y MRI, espesor 180 micrones, con cierre diente extra pesado desmontable / separable, reforzado en los extremos con anclajes plásticos, válvula bidireccional inflado/desinflado (de doble accionamiento, inflado bajo opresión de cuello-base, presurización mantenida por auto retención y válvula tapón de extremo por oclusión -obturador de accionamiento manual-, posee tubuladura de suministro de aire, desinflado por misma opresión de cuello-base, este sistema garantiza la integra inmovilización del miembro, analgesia mecánica del paciente, y la NO interrupción del tratamiento. Consta de 6 (seis) piezas, adulto/pediátricas (envasadas individualmente en plástico termo sellado), que por su exclusivo diseño y principio de funcionamiento se adaptan perfectamente a cualquier paciente, Tres superiores (mano; mano y antebrazo; mano y brazo completo), Tres inferiores (bota; bota y media pierna; bota y pierna completa).

Cabe destacar que los cierres de las piezas recorren la totalidad del desarrollo del dispositivo, (desde el extremo superior al extremo inferior) de esta manera se facilita la colocación de la férula en el miembro con absoluta comodidad y seguridad.

**Nuevos Productos de Tecnología Biomédica para Atención
en Emergencias de Fracturas, Golpes y Contusiones, brindando analgesia mecánica instantánea!!!!**




Sumamos Vida en Cada Producto



ELECTROTECNIA FIORINO

Condarco 1832 (C1416AQP) Buenos Aires - Argentina | Tel (54-11) 4581-3700 | Fax (54-11) 4583-5575
e-mail: fiorino@sion.com | www.fiorinoelect.com.ar

FERULAS INFLABLES PROFESIONALES

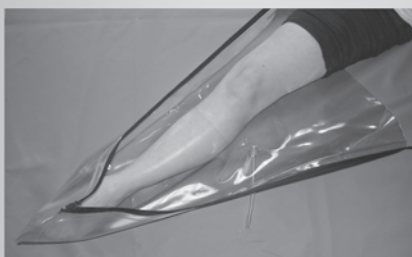

En las piezas para miembros superiores la apertura es absoluta y total, entonces ante el escenario de una probable fractura, solo es necesario elevar el miembro 10 mm, para deslizar la férula (por debajo del mismo) y luego accionar el cierre cremallera e inflar la misma, para realizar la inmovilización deseada. "Protegido Bajo el Registro de Modelo Industrial N° 79732"

Sobre todo en los miembros inferiores (dado que el cierre recorre desde el extremo superior hasta los dedos de los pies), de esta forma, se inserta la férula en el miembro (y no el miembro en la férula), evitando sufrimiento y dolores del accidentado. "Protegido Bajo el Registro de Modelo Industrial N° 79731"

De esta manera cumplimos el tan anhelado principio básico de "La tecnología al servicio del paciente, comúnmente denominada "Siglo XXI": Rápida, Segura, Fácil y Efectiva"

El set es presentado en envase cerrado, en nylon termosellado con instrucciones de uso y packing list de contenido, consta de 6 (seis) piezas, adulto/pediátricas envasadas individualmente.

Se garantiza perfectamente su aplicación para pacientes adultos, pediátricos y lactantes dado su exclusivo proyecto, diseño y principio de funcionamiento por técnica de Pascal, expansión (externa) y contra expansión (interna) de esta manera se adaptan perfectamente a cualquier anatomía sin importar edad, ni porte del paciente.

Su utilización, debido a su concepción de adaptabilidad a todo tipo de situación anatómica de paciente, hace que la versatilidad no sea una capacidad extraordinaria, sino una Calidad Standard. Este tipo de dispositivo puede utilizarse comúnmente de las siguientes maneras (entre otras).



La presentación del set es en packs cerrados de seis unidades (una de cada medida), no obstante a pedido se realizan ordenes con armados especiales o personalizados, comercialización unitaria de piezas individuales/particulares únicamente en empaques de 12 (doce) unidades por modelo.

Si bien el inflado de los dispositivos, no requiere de elementos mecánicos ni eléctricos para su correcto uso, se sugiere utilizar para esta operación un inflador manual a fuelle (adicional extracosto), de esta manera se evitara el ingreso de la típica humedad exhalatoria (por inflado bucal) y lógicamente se despejara la alta hipótesis de contagio de infecciones respiratorias.



Esta disponible para facilitar su rápido traslado y prolijo guardado (adicional extracosto) un bolso de transporte impermeable color naranja intenso, con apertura de 180°, para rápida visualización del modelo a seleccionar, apto y listo para alojamiento no solo del set de férulas inflables sino también de un set de collares cervicales planos, transformando el conjunto en un mini set de trauma, dimensiones totales 61 x 39 cm.

Composición del Set de 6 (seis) piezas.

Tres piezas p/miembros superiores, aplicaciones mas frecuentes

Pequeña: Mano Adulto
Mano y Antebrazo Pediátrico
Mano y Brazo Completo Lactante

Mediana: Mano y Antebrazo Adulto
Mano y Brazo Completo Pediátrico
Pierna Completa (sin pie) Lactante

Grande: Mano y Brazo Completo Adulto
Pierna Completa (sin pie) Pediátrico

Tres piezas p/miembros superiores, aplicaciones mas frecuentes

Pequeña: Pie/Bota Adulto
Pie/Bota con cana corta Pediátrico
Pie/Bota con cana media Lactante

Mediana: Pie/Bota con Media Pierna Adulto
Pie/Bota con Pierna Completa Pediátrico
Pie/Bota con Pierna Extra Completa Lactante

Grande: Pie/Bota con Pierna Completa Adulto
Pie/Bota con Pierna Extra Completa Pediátrico

Pueden existir, cambios y/o modificaciones de los productos exhibidos sin previo aviso, en virtud de una mayor versatilidad, mejor seguridad y comodidad de los pacientes, operadores y usuarios.



Sumamos Vida en Cada Producto



ELECTROTECNIA FIORINO

Condado 1832 (C1416AQP) Buenos Aires - Argentina | Tel (54-11) 4581-3700 | Fax (54-11) 4583-5575
e-mail: fiorino@sion.com | www.fiorinoelect.com.ar